



Partenaire novateur de la médecine

Kit d'essayage - Pessaires d'après Arabin

Contenu

11 anneaux en silicone flexible, sans noyau métallique (Ø de 50mm à 100mm) permettant de déterminer facilement la taille adéquate pour chaque patiente.

Le kit d'essayage est applicable pour tous les modèles de pessaires d'après Arabin (pessaire urétral, pessaire en anneau mince/épais, pessaire en coque urétral, cerclage, Hodge, etc.). Pour trouver la bonne taille des pessaires cube, voir table de conversion ci-après.

Mode d'emploi

Le médecin introduit l'anneau dans le vagin et le pousse bien en arrière et en haut. Après un test à l'effort (inviter la patiente à tousser, à presser, à se lever et bouger), il contrôle la position correcte et détermine ainsi la taille/le diamètre adaptée.

Note:

Toujours commencer par la taille la plus petite qui tient juste en place.

Nettoyage

Après l'utilisation, rincer les anneaux sous l'eau tiède et les stériliser au gaz ou autoclaver à **max. 120°** pendant env. 15 minutes.

(Ne doit pas entrer en contact avec des acides ou des solutions ressemblantes.)

Table de conversion

Anneaux	Pessaires cube
50 mm	Taille 0 - 25 mm
55-60 mm	Taille 1 - 29 mm
60-70 mm	Taille 2 - 32 mm
70-75 mm	Taille 3 - 37 mm
80-85 mm	Taille 4 - 41 mm
dès 90 mm	Taille 5 - 45 mm

Prix: CHF 128.00, excl. TVA et frais de port

Remarque:

Ces anneaux servent uniquement à trouver la bonne taille d'un pessaire et ne doivent en aucun cas être utilisés comme pessaire de traitement.